

AESCULAP Aicon® – Etiqueta All-In-ONE¹

ETIQUETA DESPEGABLE


1 ANTES DE LA ESTERILIZACIÓN

Fijar la etiqueta


¿Qué papel protector se retira para qué tipo de envase?



Para superficies de aluminio anodizado y bolsas transparentes sellables (en la lámina de plástico), retirar el papel protector 

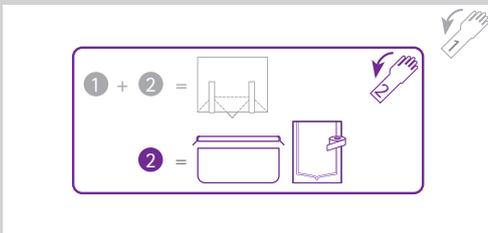

Para embalaje blando (material no tejido) retirar el papel protector  + 

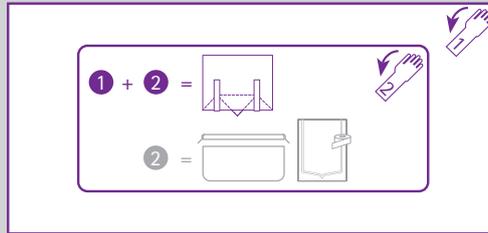

2 DESPUÉS DE LA ESTERILIZACIÓN

Despegar la etiqueta del envase estéril para la documentación permanente en la ficha del paciente

3 PARA DOCUMENTACIÓN

Pegar la etiqueta en la ficha del paciente.

RETIRAR el papel protector  +  y la lámina entre capas **POR COMPLETO** 



Etiqueta con indicador de proceso para esterilización por vapor

Descripción del cambio de color

Antes de la esterilización	Después de la esterilización
----------------------------	------------------------------

azul	marrón
------	--------

- El indicador de proceso es conforme con ISO 11140-1 tipo 1

Especificaciones

- Tamaño de la etiqueta: 75 x 35 mm
- Marca CE
- Cintas de transferencia térmica AESCULAP®:

IC-V008	apto para impresoras industriales
---------	-----------------------------------

IC-V014	apto para impresoras de escritorio
---------	------------------------------------

impresión exterior en negro²

AESCULAP® – Etiqueta All In ONE

Uso flexible para distintas superficies:

- aluminio anodizado
- bolsa transparente sellable (en la superficie del plástico)
- tela no tejida para esterilización
- papel para la documentación en la ficha del paciente

D-ST20033 0720/PDF/2

¹Solo para esterilización por vapor | ²Puede pedir más información a su contacto de Aesculap.

AESCULAP® – una marca de B. Braun

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Alemania
Teléfono +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-26 00 | www.aesculap.com